

## POLIÉSTER TRANÇADO

### Descrição

A sutura de Poliéster Trançado é uma sutura cirúrgica não absorvível, estéril composta de polímero de tereftalato de etileno, preparado a partir de fibras de alto peso molecular, cadeia longa linear com anéis aromáticos recorrentes, como componentes integral. A sutura apresenta-se tingida na coloração verde ou não tingida. O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis.

### Indicação

A sutura de Poliéster Trançado é indicada para uso em: Aproximação de tecidos e ou ligaduras; Fechamento de externo; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias ortopédicas, laparoscópicas e neurológicas.

### Ação

A sutura de Poliéster trançado causa uma resposta inflamatória nos tecidos, a qual é seguida por encapsulamento gradual da sutura pelo tecido conjuntivo fibroso. A sutura do Poliéster Trançado não é absorvida, e não ocorre qualquer mudança significativa na retensão da força tênsil "in vivo".

### Contra-Indicação

O produto é contra indicado em procedimentos onde haja o contato prolongado com soluções salinas como as encontradas no trato biliar e urinário, podendo resultar na formação de cálculos.

### Cuidados

O dispositivo só poderá ser utilizado por ou sob orientação de cirurgião segundo técnicas cirúrgicas aplicáveis e só deverá ser manipulado por pessoal qualificado. Não re-esterilizar, descartar produto aberto e não utilizado, descartar sobras e não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou molhada. Descartes de suturas utilizadas: adotar medidas de biosegurança e descarte internos, considerando risco de contaminação biológicas e materiais perfurocortantes. Descarte de suturas não utilizadas: adotar medidas de descarte internos para materiais perfurocortantes. Na manipulação deste produto deve-se tomar cuidados para que seja feito de modo asséptico. Não utilizar o produto além do prazo de validade.

### Precauções

Na manipulação desta ou qualquer outro tipo de sutura cirúrgica deve-se tomar cuidados para não contaminar os fios, manipular em local asséptico, para não danificar a sutura. Evitar o dobramento e esmagamento das agulhas pelo manuseio inadequado de pinças e porta-agulhas.

### Instruções de Uso

Utilizar a quantidade de sutura necessária, de acordo com a extensão da ferida cirúrgica e técnica adotada pelo cirurgião.

### Reações Adversas

Ocasionalmente pode ocorrer eritema, leve dor no local da sutura causado pelo trauma da ferida cirúrgica no tecido.

### Conservação

Recomenda-se conservar a temperatura de 20 a 30°C, ao abrigo da luz solar, livre de poeira, umidade e intempéries, em sua embalagem original. Transportar em veículos fechados, que protejam o produto de sol e chuva.

### Apresentação

A sutura de Poliéster Trançado é apresentada nos N°s cirúrgicos de 12-0 a 10, métrico 0,01 a 12. Apresenta-se em comprimentos pré-estabelecidos, sem agulhas ou com uma ou duas agulhas de diferentes tipos.

### Validade

A sutura de Poliéster Trançado tem validade de 5 anos, após a data de fabricação.

### CAIXA COM 12 e 24 ENVELOPES

**PRODUTO DE USO ÚNICO.**

**NÃO RE-ESTERILIZAR.**

**ESTÉRIL.**

**DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS.**

**MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU**

**ÓXIDO DE ETILENO.**

### SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA.

**FÁBRICA - AV. HERMÓG. COELHO, 3523 - ALTO DA BOA VISTA**

**CEP 76100-000 - FONE: (64)3671-1453 - FAX: (64)3601-1576**

**SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO**

**Farmacêutica Responsável:**

**Drª CÍNTIA FLORETINO DE CASTRO COSTA - CRF-GO 6035**

**VENDAS - AV. C-255 N° 270-SALAS: 606/611**

**CENTRO EMPRESARIAL SEBBA - NOVA SUIÇA**

**CEP: 74280-010 - FONE/FAX:(62)3259-4546 - GOIÂNIA - GO**

**Registro no Ministério da Saúde N° 10243410023**