



SEDA

Descrição

A sutura de Seda é uma sutura cirúrgica não absorvível estéril oriunda do bicho da seda (Bom Byx Mori L), sendo a mesma preparada para obtenção de fios pretos e trançados, podendo ser ou não providos de agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis.

Indicação

A sutura de Seda é indicada para uso em: Processos cirúrgicos gerais; fechamento de paredes teciduais; Cirurgias gastro intestinais; Processo cirúrgico Buco Maxilo Facial, Gengivas utilizando a técnica ponto a ponto, segundo critério médico ou odontológico.

Ação

A sutura de Seda causa uma resposta inflamatória nos tecidos, a qual é seguida por encapsulamento gradual da sutura pelo tecido conjuntivo fibroso. A sutura da Seda não é absorvida, e não ocorre qualquer mudança significativa na retensão da força tênsil "in vivo".

Contra-Indicação

o produto é contra indicado em procedimentos onde haja o contato prolongado com soluções salinas como as encontradas no trato biliar e urinário, podendo resultar na formação de cálculos.

Cuidados

O dispositivo só poderá ser utilizado por ou sob orientação de cirurgião segundo técnicas cirúrgicas aplicáveis e só deverá ser manipulado por pessoal qualificado. Não re-esterilizar, descartar produto aberto e não utilizado, descartar sobras e não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou molhada. Descartes de suturas utilizadas: adotar medidas de biosegurança e descartes internos, considerando riscos de contaminação biológica por materiais perfurocortantes. Descarte de suturas não utilizadas: adotar medidas de descartes internos para materiais perfurocortantes. Na manipulação deste produto, deve-se tomar cuidados para que seja feito de modo asséptico. Não utilizar o produto além do prazo de validade.

Precauções

Na manipulação desta ou qualquer outro tipo de sutura cirúrgica deve-se tomar cuidados para não contaminar os fios, manipular em local asséptico, para não danificar a sutura. Evitar o dobramento e esmagamento das agulhas, pelo manuseio inadequado de pinças e porta-agulhas.

Instruções de Uso

Utilizar a quantidade de sutura necessária, de acordo com a extensão da ferida cirúrgica e técnica adotada pelo cirurgião.

Reações Adversas

Ocasionalmente pode ocorrer eritema leve, dor no local da sutura causada pelo trauma da ferida cirúrgica no tecido.

Conservação

Recomenda-se conservar a temperatura de 20 a 30°C, ao abrigo da luz solar, livre de poeira, umidade e intempéries, em sua embalagem original. Transportar em veículos fechados, que protejam o produto de sol e chuva.

Apresentação

A sutura de Seda é apresentada nos N^{os} cirúrgicos de 12-0 a 10, métrico 0,01 a 12. Apresenta-se em comprimentos pre-estabelecidos, sem agulhas ou com uma ou duas agulhas de diferentes tipos.

Validade

A sutura de Seda tem validade de 5 anos, após a data de fabricação.

CAIXA COM 12 e 24 ENVELOPES

PRODUTO DE USO ÚNICO.

NÃO RE-ESTERILIZAR.

ESTÉRIL.

DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS.

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU

ÓXIDO DE ETILENO.

SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA.

FÁBRICA - AV. HERMÓG. COELHO, 3523 - ALTO DA BOA VISTA

CEP 76100-000 - FONE: (64)3671-1453 - FAX: (64)3601-1576

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Farmacêutica Responsável:

Dr^a CÍNTIA FLORENTINO DE CASTRO COSTA - CRF-GO 6035

VENDAS - AV. C-255 N^o 270-SALAS: 606/611

CENTRO EMPRESARIAL SEBBA - NOVA SUIÇA

CEP: 74280-010 - FONE/FAX:(62)3259-4546 - GOIÂNIA - GO

Registro no Ministério da Saúde N^o 10243410013